

# 新城疫 禽流感

## 抗体快速检测卡



### 特点

- **阻断法:** 不同于其他方法的快速检测卡, 与间接血凝实验有很高的符合率。
- **便捷、快速的检测工具:** 极为简单的操作, 快速出结果。
- **经济的检测成本:** 优秀的检测工具, 低廉的价格。


### 新城疫抗体快速检测卡技术参数

原理: 阻断法胶体金侧向层析  
检测样品: 血清  
判读时间: 20分钟  
敏感性: 99%  
特异性: 96%  
保质期: 24个月  
保存温度: 2-30℃  
包装: 20份/盒

### 禽流感抗体检测卡技术参数

原理: 阻断法胶体金侧向层析  
检测样品: 血清  
判读时间: 20分钟  
敏感性: 97%  
特异性: 97%  
保质期: 24个月  
保存温度: 2-30℃  
包装: 20份/盒

### 测试步骤

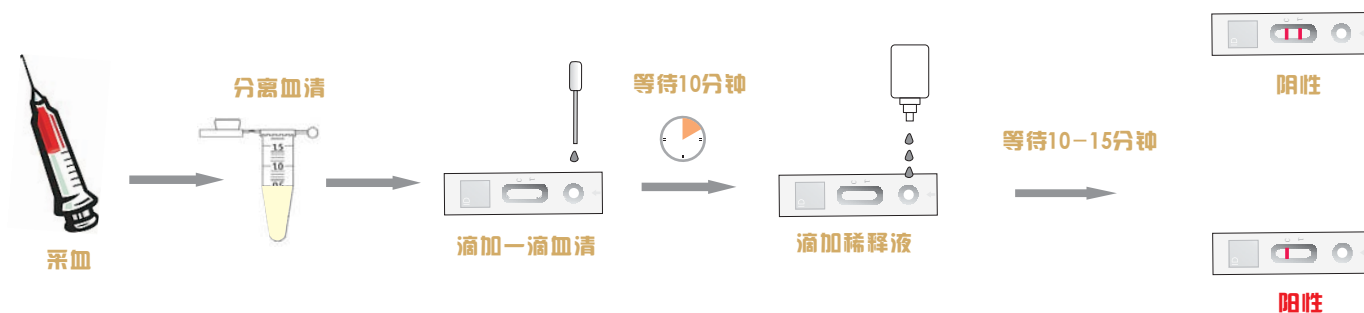

阻断法测抗体, 通过血清中的特异性抗体阻断标记抗体与相应抗原的结合, 而使检测信号与待检抗体水平呈反比。真瑞生物的阻断法抗体检测卡因为采用了单克隆抗体作为被阻断的标记抗体, 因而具有高敏感性与高特异性, 与HI方法有96%以上的符合率。

同时, 我们的检测阈值是HI 1: 32, 通过对被检血清进行倍比稀释, 找到其呈现阳性的最大稀释倍数, 则可以得出抗体HI值。